

**安全に正しくお使い頂くために**

1. ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。
2. この取扱説明書は、いつでも見られるところに保管してください。

禁忌・禁止

- (1) 直射日光、高温多湿に保管した本製品は使用しないこと。変色性能が変化することや、使用前に着色する恐れがある。
- (2) 本製品は中央の点線以外で切断しないこと。変色性能が変化することや、耐久性が低下する恐れがある。

製品概要

STeM-5 は、ISO11140-1 の Type5 に分類されるケミカルインジケータ (CI) であり、蒸気滅菌工程の確認に使用することができます。蒸気滅菌の重要なパラメータである蒸気、時間、温度の積算条件によって、灰色または緑色に変色します。

表 1. 製品規格

品番	合格条件 (SV)	寸法 (mm)	1C/S 入数 (枚)
STeM-5	135℃ - 4.0 分 128℃ - 8.0 分 121℃ - 16.5 分	23×92	500

- 注：① 乾熱滅菌法、エチレンオキシドガス滅菌法や他の低温滅菌法、その他用途への使用はおやめください。
 ② 滅菌条件に達したかどうかを確認するものであり、無菌性を保証するものではありません。その他目的には使用しないでください。
 ③ 滅菌の際、ドレインが多量に発生する場所にインジケータを置かないでください。インジケータ表面にドレインが付着すると、剥離や性能変化の原因となります。

使用方法


1. 使用前にインジケータ全体の外観と色調に異常がないことを確認してください。
2. 本製品を滅菌工程の確認したい場所へ設置し、高圧蒸気滅菌処理を行ってください。
3. 滅菌サイクル終了後、インジケータの色を目視で確認します。インジケータが灰色または緑色に変化した場合（紫色の点なし）、合格条件で滅菌処理されたことを示します。
4. インジケータが紫色の点が残っているまたは灰色か緑色に達していない場合、合格条件に達していない（不合格）ことを示します。この場合、条件や原因を確認し、必要によって再滅菌処理を行ってください。

表 2. インジケータ色調

使用前	合格	不合格
		

保管・使用期限

1. 本製品は 25℃以下で製品パッケージ（遮光袋）に入れた状態で保管してください。
2. 本製品の使用期限は製品ラベルに表示されています。

【販売元】  日油技研工業株式会社

第 1 営業部：東京都豊島区南池袋 2-25-5 (藤久ビル東五号館 13F) 電話：03 (3986) 4521 (代)

大阪支店：大阪府大阪市北区堂島 2-4-27 (JRE 堂島タワー 12F) 電話：06 (7176) 5575 (代)